

Non-Eugenol Tijdelijk Cement

Algemene informatie

ToDent® Temp NE is een zinkoxide / non-Eugenol tijdelijk cement voor het cementeren van voorlopige restauraties.

ToDent® Temp NE is geïndiceerd voor patiënten die allergisch zijn voor Eugenol en het wordt gebruikt voor cementatie of bescherming van de pulpa bij chirurgische operaties van een restauratie of orthodontie.

Samenstelling

Zinkoxide, Rosin, etc.

Indicaties

- Zinkoxide / Non-Eugenol tijdelijk cement
- Tijdelijke cementering van kroon / brug / Inlays / Onlays
- Tijdelijke cementering van tijdelijke / permanente restauratie

Timing

Verwerkingstijd 1 min 30 sec

Uithardingstijd <4 min (intraoraal)

Contra-indicaties

Als een droog werkveld niet kan worden vastgesteld of de vastgestelde toepassingstechniek niet kan worden toegepast.

Als bekend is dat de patiënt allergisch is voor een van de ingrediënten.

Voorzorgsmaatregelen

- Het product bevat stoffen die bij bepaalde personen een allergische reactie kunnen veroorzaken bij contact met de huid.
- Om het risico op allergische reacties te verminderen. Minimaliseer blootstelling aan niet-uitgehard materiaal. Bij langdurig contact, spoel



met grote hoeveelheden water. Als er een allergische reactie optreedt, zoek dan medische hulp indien nodig.

Toepassing

Voor gebruik

1. Controleer de vervaldatum en vermijd contaminatie van de verpakking.
2. Volg de instructies voor gebruik voordat u deze gebruikt.
3. Open de dop van de spuit en plaats vervolgens een wegwerpbare tip op de spuit.

Procedure

1. Droog de voorbereide elementen en het interne oppervlak van de restauratie.
2. Verwijder de dop van de spuit en monteer de Eco-tip.
3. Extrudeer door de zuiger op het mengpaneel te drukken.
4. Meng Base en Catalyst volledig met een spatel gedurende 30 seconden.
5. Breng het gemengde ToDent® Temp NE-cement aan op de interne oppervlakken van de tijdelijke restauratie.
6. Zet de restauratie stevig in de mond.
7. Verwijder overtollig cement nadat het materiaal is uitgehard.

Opslag & gebruik

Dit product is ontworpen om te worden bewaard en gebruikt bij kamertemperatuur. Als gekoelde opslag wordt gebruikt, laat het product dan vóór gebruik op kamertemperatuur komen. Houdbaarheid bij kamertemperatuur is 24 maanden. Zie de buitenverpakking voor de vervaldatum. Omgevingstemperaturen hoger dan 27°C/80° F kunnen de houdbaarheid verkorten. Stel restauratiematerialen niet bloot aan hoge temperaturen of aan fel licht. Bewaar geen materialen in de buurt van producten die Eugenol bevatten. Desinfecteer het product met een desinfectieproces op tussenliggend niveau (contact met vloeistof) zoals aanbevolen door de CDC en goedgekeurd door de ADA. Richtlijnen voor infectiebeheersing in de tandheelkundige gezondheidszorg-instelling - 2003 (deel 52; geen RR-17), centra voor ziektebestrijding en -preventie.

Verwijderen

Zie het Veiligheidsinformatieblad (beschikbaar op webshop.todent.eu/tempne of via uw lokale dealer) voor informatie over verwijdering.

Klant Informatie

Niemand is geautoriseerd om informatie te verstrekken die afwijkt van de informatie die in dit instructieblad wordt verstrekt.

Waarschuwing

Dit product dient alleen te worden gebruikt door een tandheekkundige

professional.

Garantie


ToDent® garandeert dat dit product vrij is van defecten in materiaal en productie. ToDent® geeft geen andere garanties met inbegrip van enige impliciete garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid van het product voor de toepassing van de gebruiker. Als dit product defect is binnen de garantieperiode, is uw exclusieve recht en ToDent®'s enige verplichting reparatie of vervanging van het product van de ToDent®.

Beperking van aansprakelijkheid

Behalve waar dit bij wet verboden is, is ToDent® niet aansprakelijk voor verlies of schade voortvloeiend uit dit product, ongeacht of het directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade betreft, ongeacht de theorie die wordt beweerd, inclusief garantie, contract, nalatigheid of strikte aansprakelijkheid.



SPIDENT CO., LTD
203 & 312 Korea Industrial Complex, 722, Gojan-
Dong, Namdong-Gu, Incheon, Korea 405-821

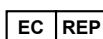

DONGBANG ACUPRIME
1 The Forrest Units, Hennock Road East,
Marsh Barton, Exeter EX2 8RU, U.K.