

Omschrijving

ToDent® Ease is een eenvoudige eenstaps desensitizer voor de behandeling en het voorkomen van dentinale hypersensitiviteit. Het dicht snel en effectief de dentinetubuli en remt de groei van bacteriën.

Indicaties voor gebruik

- Onder alle indirecte harsgebonden inlays, onlays, kronen of facings.
- Onder amalgaam en composiet restauraties.
- In combinatie met andere dentine bonding adhesieven.

Contra-indicaties

Niet bekend.

Waarschuwingen

- Na gebruik altijd direct de dop terugplaatsen.
- Vermijd contact van ToDent® Ease met zacht mondweefsel, ogen en huid. Bij contact met zacht mondweefsel, ogen of huid direct grondig spoelen met water. Bij kort contact met de ogen direct met ruime hoeveelheden water spoelen en een arts raadplegen. Langdurig contact met weefsel kan resulteren in een brandend gevoel.

Voorzorgsmaatregelen

Voor gebruik veiligheidsblad en gebruiksaanwijzing bestuderen. Gebruik alleen zoals aangegeven.

Bijwerkingen

Reeds bestaande huid- en oogandoeningen kunnen verergeren door blootstelling aan dit product.



Toepassing


1. Het dentine oppervlak voorbereiden en schoonmaken. Het is niet nodig dat het dentine volledig droog is, een lichte vochtigheid is acceptabel.
2. ToDent® Ease met een kwastje of een ander geschikt instrument aanbrengen. Gedurende 10 seconden mild inwrijven stimuleert de opname van de desensitizer in de dentine tubuli.
3. Desensitizer 30 seconden laten inwerken.
4. Voorzichtig met lucht het residu dispensereren tot een dunne laag. Vervolgens drogen met lucht. Niet spoelen.
5. Applicatie herhalen als gevoeligheid aanblijft of opnieuw optreed.

Opslag

Het wordt aanbevolen dit product gekoeld te bewaren. Opslag tussen de 2°C/36°F tot 27°C/80°F. Voor gebruik op kamertemperatuur laten komen. Product niet invriezen. Zie verpakking voor houdbaarheidsdatum.



DENTAL TECHNOLOGIES, INC.
6901 N. Hamlin Ave., Lincolnwood, IL
60712, United States of America

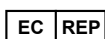

EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20,
2514 AP, The Hague, The Netherlands

