

### Lichtuithardende pit-en fissuurverzegeling

#### Algemene informatie

ToDent® Seal LC is een licht-uitgehard, methacrylaat gebaseerd pit & fissuurafdichtmiddel dat is geïndiceerd voor cariës-preventie. De viscositeit ervan zorgt voor een volledige afdichting van de putdiepten en hecht goed op het glazuuroppervlak. De toevoeging van nano-vulstoffen maakt ToDent® Seal LC bestand tegen slijtage en krimp van de polymerisatie.

#### Indicaties

Afdichten / vullen van put en spleet  
Vulling van kleine cariës  
Vulling van melktanden  
Verzegeling van marge lekkage

#### Contra-indicaties

Als een droog werkveld niet kan worden vastgesteld of de vastgestelde toepassingstechniek niet kan worden toegepast.  
Als bekend is dat de patiënt allergisch is voor een van de ingrediënten.

#### Voorzorgsmaatregelen

Het product bevat stoffen die bij bepaalde personen een allergische reactie kunnen veroorzaken bij contact met de huid.  
Om het risico op allergische reacties te verkleinen, minimaliseert u de blootstelling aan deze materialen. Vermijd in het bijzonder blootstelling aan niet-uitgehard product. Bij langdurig contact, spoel met grote hoeveelheden water. Als er een allergische reactie optreedt, zoek dan medische hulp indien nodig.



## Toepassing

### Vorbereiding

1. Controleer de vervaldatum en vermijd contaminatie van de verpakking.
2. Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik.
3. Open de dop van de spuit en plaats een wegwerpbare tip op de spuit.

### Restauratie

1. Isoleer elementen die worden behandeld om speeksel en bloedbesmetting te voorkomen. Het tandoppervlak moet worden gedroogd.
2. Reinig elementen grondig om tandplak en vuil van glazuerooppervlakken en kloven te verwijderen. De morfologie van putten en kloven moet voldoende diep zijn.
3. Breng etsmiddel aan, b.v. ToDent® Etsgel 37%, voor alle glazuerooppervlakken gedurende 20 seconden.
4. Spoel tanden grondig met lucht / waternevel om etsmiddel te verwijderen. Verwijder spoelwater met afzuiging en droog de geëtste oppervlakken. Voorkom vervuiling van het geëtste oppervlak met speeksel.
5. Gebruik de punt van de tip of een microbrush om ToDent® Seal LC langzaam in de voorbereide pitten en fissuren te brengen. Door de sealant tijdens het plaatsen met de spuittip te roeren of door zachtjes te schrobben met een microbrush, worden mogelijke bellen verwijderd en de stroom naar diepere pitten en fissuren verbeterd.
6. Hard de sealant uit met een geschikt uithardingslamp gedurende ongeveer 20 seconden.
7. Controleer de afdichting en occlusie.

### Opslag & gebruik

Dit product is ontworpen voor gebruik op kamertemperatuur. Als gekoelde opslag wordt gebruikt, laat het product dan vóór gebruik op kamertemperatuur komen. Houdbaarheid bij kamertemperatuur is 24 maanden. Zie de buitenverpakking voor de vervaldatum.

Omgevingstemperaturen hoger dan 27°C/80° F kunnen de houdbaarheid verkorten. Stel restauratiematerialen niet bloot in de nabijheid van producten die eugenol bevatten. Desinfecteer het product met een desinfectieproces op tussenliggend niveau (contact met vloeistof) zoals aanbevolen door de CDC en goedgekeurd door de ADA. Richtlijnen voor infectiebeheersing in tandheelkundige zorginstellingen-2003 (deel 52; nr. RR-17), centra voor ziektebestrijding en -preventie.

### Verwijderen

Zie het Veiligheidsinformatieblad (beschikbaar op [webshop.todent.eu/seal](http://webshop.todent.eu/seal) of via uw lokale dealer) voor informatie over verwijdering.

## Klant Informatie

Niemand is geautoriseerd om informatie te verstrekken die afwijkt van de informatie die in dit instructieblad wordt verstrekt.

## Waarschuwing

Dit product dient alleen te worden gebruikt door een tandheelkundige professional.

## Garantie


ToDent® garandeert dat dit product vrij is van defecten in materiaal en productie. ToDent® geeft geen andere garanties met inbegrip van enige impliciete garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid van het product voor de toepassing van de gebruiker. Als dit product defect is binnen de garantieperiode, is uw exclusieve recht en ToDent®'s enige verplichting reparatie of vervanging van het product van de ToDent®.

## Beperking van aansprakelijkheid

Behalve waar dit bij wet verboden is, is ToDent® niet aansprakelijk voor verlies of schade voortvloeiend uit dit product, ongeacht of het directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade betreft, ongeacht de theorie die wordt beweerd, inclusief garantie, contract, nalatigheid of strikte aansprakelijkheid.



SPIDENT CO., LTD  
203 & 312 Korea Industrial Complex, 722, Gojan-  
Dong, Namdong-Gu, Incheon, Korea 405-821

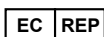

DONGBANG ACUPRIME  
1 The Forrest Units, Hennock Road East,  
Marsh Barton, Exeter EX2 8RU, U.K.