

### Wortelkanaalbereiding EDTA Cream

#### Kop Algemene informatie

ToDent® CanalPrep is een gebruiksklare EDTA creamer die pulpaweefsel in het wortelkanaal verwijderd. Het kan anorganische matrix verwijderen door goede chelatatie en vijlen en ruimers zijn makkelijker te gebruiken door het smeringseffect.

#### Samenstelling

Ethyleendiaminetetraazijnzuur (EDTA)

Ureumperoxide

Polypropyleenglycol & polyethyleenglycol

#### Indicaties

- Debridement in het wortelkanaal
- Oplossen van resten van de pulpa
- Verwijderen van smeerlaag
- Makkelijker bewegen van kanaalinstrumenten
- Microbicide behandeling in het kanaal

#### Contra-indicaties

- Gebruik het materiaal niet in geval van allergieën voor een van de componenten of in geval van contactallergieën.
- De plaatsing van ToDent® Base LC is gecontra-indiceerd wanneer een relatief droog werkgebied of de aanbevolen aanbrengtechniek niet mogelijk is.

#### Voorzorgsmaatregelen

Het product bevat stoffen die bij bepaalde personen een allergische reactie kunnen veroorzaken bij contact met de huid. Om het risico op allergische reacties te verkleinen, minimaliseert u de blootstelling aan deze materialen. Vermijd in het bijzonder blootstelling aan niet-uitgehard product. Bij langdurig contact, spoel met grote hoeveelheden water. Als er een allergische reactie optreedt, zoek dan medische hulp indien nodig.



## Toepassing

### Vorbereiding

1. Controleer de vervaldatum en vermijd contaminatie van de verpakking.
2. Bestudeer de instructies voor gebruik voordat u het product gebruikt.
3. Open de dop van de spuit en plaats een disposable tip op de spuit.

### Behandeling

1. Plaats een disposable tip in de tandreiniger (ToDent® CanalPrep).
2. Breng ToDent® CanalPrep aan op het wortelkanaalinstrument en bereidt het wortelkanaal voor.
3. Breng ToDent® CanalPrep aan in het voorbereide wortelkanaal. Na 1-2 minuten reinigen met 3% NaOCl-oplossing om de EDTA te verwijderen

## Opslag & gebruik

Dit product is ontworpen voor gebruik op kamertemperatuur. Als gekoelde opslag wordt gebruikt, laat het product dan vóór gebruik op kamertemperatuur komen. Houdbaarheid bij kamertemperatuur is 36 maanden. Zie de buitenverpakking voor de vervaldatum. Omgevingstemperaturen hoger dan 27°C/80° F kunnen de houdbaarheid verkorten. Stel restauratiematerialen niet bloot in de nabijheid van producten die eugenol bevatten.

Desinfecteer het product met een desinfectieproces op tussenliggend niveau (contact met vloeistof) zoals aanbevolen door de CDC en goedgekeurd door de ADA. Richtlijnen voor infectiebeheersing in tandheelkundige instellingen voor gezondheidszorg - 2003 (deel 52; nr. RR-17). Centrum voor ziektecontrole en Preventie.

## Verwijderen

Zie het Veiligheidsinformatieblad (beschikbaar op [webshop.todent.eu/canalprep](http://webshop.todent.eu/canalprep) of via uw lokale dealer) voor informatie over verwijdering.

## Klant Informatie

Niemand is geautoriseerd om informatie te verstrekken die afwijkt van de informatie die in dit instructieblad wordt verstrekt.

## Waarschuwing

Dit product dient alleen te worden gebruikt door een tandheelkundige professional.

## Garantie


ToDent® garandeert dat dit product vrij is van defecten in materiaal en productie. ToDent® geeft geen andere garanties met inbegrip van enige impliciete garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid van het product voor de toepassing van de gebruiker. Als dit product defect is binnen de garantieperiode, is uw exclusieve recht en ToDent®'s enige verplichting reparatie of vervanging van het product van de ToDent®.

## Beperking van aansprakelijkheid

Behalve waar dit bij wet verboden is, is ToDent® niet aansprakelijk voor verlies of schade voortvloeiend uit dit product, ongeacht of het directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade betreft, ongeacht de theorie die wordt beweerd, inclusief garantie, contract, nalatigheid of strikte aansprakelijkheid.



SPIDENT CO., LTD  
203 & 312 Korea Industrial Complex, 722, Gojan-Dong, Namdong-Gu, Incheon, Korea 405-821

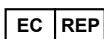

DONGBANG ACUPRIME  
1 The Forrest Units, Hennock Road East,  
Marsh Barton, Exeter EX2 8RU, U.K.