

# TODENT® HYBRID

Lichtuithardend micro-hybride composiet

[GEBRUIKSAANWIJZING]

## Omschrijving

ToDent® Hybrid is een lichthardend micro-hybride hars-gebaseerd composiet materiaal met fluoride. ToDent® Hybrid is verkrijgbaar in 6 Vita®\* kleuren, een opaker en een incisaal kleur. De organische matrix oligomeer is gebaseerd op Bis-GMA-hars. De hoeveelheid anorganische vulling bedraagt ongeveer 53% van het volume met een gemiddelde deeltjesgrootte van 0.02-2 micron. ToDent® Hybrid is een radiopaak restauratief composiet wat eenvoudige identificatie mogelijk maakt.

## Indicaties voor gebruik

ToDent® Hybrid universeel restauratiemateriaal is aanbevolen voor gebruik in Klasse I en II restauraties en geschikt (esthetisch) voor gebruik in klasse III, IV en V restauraties.

## Voorzorgsmaatregelen voor patiënten en personeel

ToDent® Hybrid restauratiemateriaal bevat acrylaatkunstharsen. Vermijd het gebruik van dit product bij patiënten met bekende acrylaatallergieën.

## Waarschuwingen

- Vermijd contact van ToDent® Etsgel met zachte mondweefsels, ogen en huid. Bij contact met met weefsel, ogen of huid 15 minuten grondig met water wassen. Zoek medische hulp.
- Niet gebruiken in de nabijheid van materialen op een eugenolbasis. Volledige uitharding kan uitblijven.

## Algemene voorzorgsmaatregelen

- Naar de Amerikaanse federale wet mag dit product alleen aan, of op voorschrift van, een tandarts worden verkocht.
- Bekijk gebruiksinstructies en VIB (webshop.todent.eu) voorafgaand aan het begin van de behandeling. Gebruik alleen zoals aangegeven.

## Bijwerkingen

Allergische of reeds bestaande huid, ogen en luchtwegen aandoeningen kunnen verergeren door blootstelling aan dit product.

## Gebruiksaanwijzingen

1. Bereid het element voor. Isoleer en droog het element grondig.
2. Indien ToDent® Etsgel 37 wordt gebruikt ets dan het glazuur gedurende 20 seconden; indien toegepast op het dentine dan 15 seconden; laat de ets nooit langer dan 60 seconden op het element zitten.
3. Grondig spoelen met water.
4. Volg de instructies van de fabrikant aangaande etsen, primen, aanbrengen van adhesief en uitharden.
5. Selecteer de juiste kleur ToDent® Hybrid. Breng direct op de preparatie laagjes van maximaal 2 mm aan.
6. Gebruik een lichtuithardingslamp met minimaal 600 mW/cm<sup>2</sup>. Ieder laagje minimaal 40 seconden lichtuitharden.
7. Afwerken en polijsten met standaard technieken. Een composiet oppervlakte sealant kan ook gebruikt worden om de gladheid te verbeteren en microscheurtjes en oneffenheden veroorzaakt door de afwerking procedures te sluiten.

## Opslag

1. ToDent® Hybrid is ontworpen voor gebruik op kamertemperatuur Zie de verpakking voor de expiratedatum. Niet invriezen. Aanbevolen opslag condities zijn tussen de 2°C/36°F tot 27°C/80°F. Voor gebruik op kamertemperatuur laten komen (22°C/72°F).
2. Stel het restauratiemateriaal niet bloot aan hoge temperaturen of intens licht.
3. Bij gebruik van eenheidsdoserings-capsules, die bestemd zijn voor eenmalig gebruik, de capsule na elke patiënt weggoien. Bij gebruik van spuit, altijd de dop terugplaatsen na elk gebruik.

\* Vita is een geregistreerd handelsmerk van VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG Duitsland