

Werking en eerste gebruik

De ToDent® CoMax Composiet Dispenser kan gebruikt worden met de meeste standaard composietcompules. Plaats de compule door de voorste hendel op de loop terug te trekken. (Zie Afb.1 op de volgende pagina) Laat de hendel los om de compule op zijn plaats vast te zetten. Plaats 4 vingers op de trekker en trek deze terug om composiet uit te drukken (zie Afb.2 op de volgende pagina) Om de compule te verwijderen, trekt u de hendel terug en de compule valt vanzelf uit de dispenser. (Het is dus niet nodig de compule aan te raken, zie figuur 3 op de volgende pagina)



Veiligheidsmaatregelen




- Zorg er altijd voor dat de compule volledig in de cilinder zit en is vastgezet met de verende hendel, alvorens u composiet uitdrukt.
- Zorg er altijd voor dat uw merk en stijl van compule compatibel is met de ToDent® CoMax. Test de compatibiliteit door materiaal uit te drukken op een mengblok of tafelblad vóór gebruik bij een patiënt.

Reiniging en sterilisatie

- De ToDent® CoMax-dispenser kan worden geautoclaveerd in een stoomautoclaaf. Het gebruik van een chemische stoomsterilisator wordt afgeraden.
- De ToDent® CoMax-dispenser kan thermisch worden gedesinfecteerd in een thermodesinfector. Elk reinigingsmiddel kan worden gebruikt.
- Het kan ook handmatig worden gereinigd met een doekje en een desinfectiemiddel zoals bijvoorbeeld Cidex®.

DOMPEL DE TODENT® COMAX-DISPENSER
NOOIT ONDER IN EEN DESINFECTERENDE
OPLOSSING.

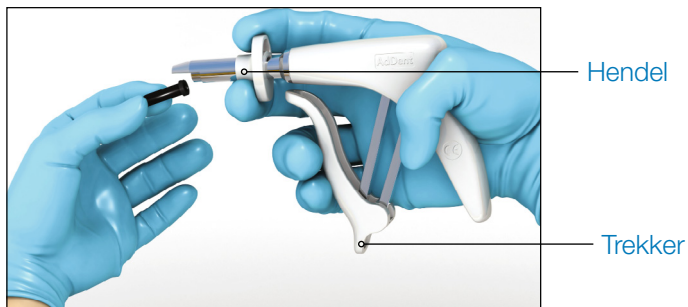

AFBEELDING 1

De compule in de ToDent® CoMax-dispenser laden



AFBEELDING 2

De ToDent® CoMax vasthouden om composiet uit te drukken




AFBEELDING 3

De gebruikte compule uit de ToDent® CoMax-dispenser verwijderen



ADDENT, INC.
43 Miry Brook Road,
Danbury CT 06810, USA

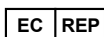

EMERGO EUROPE
Molenstraat 15,
2513 BH, The Hague, The Netherlands



P/N 660104 REV D 5/2017