

Lichtuithardende 5e generatie Bonding Agent

Algemene informatie

5° generatie hechtingsmiddel ToDent® Bond LC is een primer + adhesief ontworpen door Spident® om superieure hechtingskracht te garanderen in een eenstaps-applicatie. De formulering is compatibel met alle klassen van directe composietrestauraties op dentine en glazuur, evenals met bonding behandeld porselein en amalgaam.

Samenstelling

Organische matrix:

Bis (2-methacryloyloxyethyl) pyromellitaat,

Hydroxyethylmethacrylaat, aceton

Additieven: initiator, katalysator, stabilisator, andere

Timing

Lichtuitharden 10-20 sec

Indicaties

- Alle directe composietrestauraties
- Gerichte krimp composietrestauraties
- Indirecte restauratieve cementatie: metaal, porselein en composiet
- Adhesieve (gebonden) amalgaamrestauraties
- Nieuw amalgaam op oud amalgaam
- Porselein reparaties
- Composiet op composiet (reparatie)
- Composiet op metaal / set amalgaam (directe veneering)

Toepassing

1. **Isolatie:** Een cofferdam is de isolatiemethode die de voorkeur geniet.
2. **Ruw het bestaande materiaal:** maak het oppervlak van bestaande amalgaam of composiet ruw met een boor-, diamant- of zandstraaltechniek.
3. **Tandvoorbereiding:** afspoelen en afdrogen.



Verwijder minimale tandstructuur.

4. **Caviteit-preparatie:** caviteit voorbereiden met minimale tandreductie. Gebruik voldoende bescherming voor de pulpa. Gebruik een liner / onderlaag (ToDent® Base LC) in gebieden met diepe excavaties.
5. **Etsen:** breng ToDent® Etsgel aan op glazuur en dentine. Wacht 15 seconden. Spoel gedurende 10 seconden. Overtollig water wegblazen met een wattenpellet of mini-sponsje. Het oppervlak moet glinsteren zonder water te verzamelen.
6. **Adhesief:** Breng onmiddellijk na het etsen, gedurende 15 seconden met een zachte beweging en een volledig verzadigde applicator, 2-3 opeenvolgende lagen (ToDent® Bond LC) aan op het geëtste glazuur en dentine. Laat de lucht gedurende 5 seconden zachtjes verdampen om oplosmiddelen te verdampen.
7. **Lichtuitharden:** lichtuitharden gedurende 10-20 seconden.
8. **Restauratieve plaatsing:** plaats het restauratiemateriaal stapsgewijs en hard elke stap apart uit. Hard het restauratiemateriaal voldoende uit volgens de instructies van het restauratiemateriaal. Pas de occlusie zorgvuldig aan. Controleer op hyperocclusie, in het bijzonder in laterale uitwijkcontacten.

Opslag & gebruik

Dit product is ontworpen voor gebruik op kamertemperatuur. Laat het product vóór gebruik op kamertemperatuur komen als het in de koelruimte wordt bewaard. Houdbaarheid van de flaconafgifte bij kamertemperatuur is 36 maanden. Omgevingstemperaturen hoger dan 27°C/80°F kunnen de houdbaarheid verkorten. Zie de buitenverpakking voor de vervaldatum. Sla ToDent® Bond LC niet op in de buurt van producten die eugenol bevatten.

Bijwerkingen

In zeldzame gevallen kan ToDent® Bond LC een sensibiliserende reactie veroorzaken bij overgevoelige patiënten als gevolg van een van de bestanddelen. In dergelijke gevallen mag ToDent® Bond LC niet meer worden gebruikt.

Verwijderen

Zie het Veiligheidsinformatieblad (beschikbaar op webshop.todent.eu/bondlc of via uw lokale dealer) voor informatie over verwijdering.

Klant Informatie

Niemand is geautoriseerd om informatie te verstrekken die afwijkt van de informatie die in dit instructieblad wordt verstrekt.

Waarschuwing

Dit product dient alleen te worden gebruikt door een tandheekkundige professional.

Garantie


ToDent® garandeert dat dit product vrij is van defecten in materiaal en productie. ToDent® geeft geen andere garanties met inbegrip van enige impliciete garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid van het product voor de toepassing van de gebruiker. Als dit product defect is binnen de garantieperiode, is uw exclusieve recht en ToDent®'s enige verplichting reparatie of vervanging van het product van de ToDent®.

Beperking van aansprakelijkheid

Behalve waar dit bij wet verboden is, is ToDent® niet aansprakelijk voor verlies of schade voortvloeiend uit dit product, ongeacht of het directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade betreft, ongeacht de theorie die wordt beweerd, inclusief garantie, contract, nalatigheid of strikte aansprakelijkheid.



SPIDENT CO., LTD
203 & 312 Korea Industrial Complex, 722, Gojan-
Dong, Namdong-Gu, Incheon, Korea 405-821

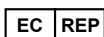

DONGBANG ACUPRIME
1 The Forrest Units, Hennock Road East,
Marsh Barton, Exeter EX2 8RU, U.K.