

#### Belangrijke aanwijzingen

1. Het hoekstuk mag alleen worden gebruikt door gecertificeerde tandartsen of mondhygiënist.
2. Gebruik geen verdraaide, versleten, beschadigde of niet-ISO-norm boren.
3. Hoekstuk niet uit elkaar halen of aanpassen.
4. Hoekstuk niet laten vallen of onderwerpen aan overmatige schokken.
5. Hoekstuk mag niet ultrasoon worden gereinigd.
6. Het hoekstuk moet voor iedere behandeling of voor elke sterilisatie met onderhoudsproducten worden gereinigd.
7. Het spansysteem moet minimaal 1 x per week worden gereinigd door aan de voorzijde het instrument 1 seconde door te sprayen.
8. Het spansysteem regelmatig controleren op klemkracht en werking.
9. Zorg ervoor dat het hoekstuk normaal werkt voorafgaand aan elke behandeling.
10. Indien er afwijkingen optreden, zoals trillingen, lawaai, of oververhitting, dan direct stoppen met het gebruik van het hoekstuk en onmiddellijk opsturen voor reparatie.

#### Aansluiten / loskoppelen van het hoekstuk

1. Plaats het hoekstuk met lichte druk op de snelkoppeling. **Opmerking:** Zorg ervoor dat het hoekstuk nauw sluit met de snelkoppeling.
2. Loskoppelen hoekstuk van de snelkoppeling. Trek het hoekstuk met lichte druk los van de snelkoppeling.

#### Het plaatsen van boren

##### 1. Plaatsen van de boor

Druk op de drukknop met uw duim en steek de boor in het hoekstuk, dan laat u de drukknop weer los. **Opmerking:** de boor moet zo ver mogelijk worden ingebracht.

#### Luchtdruk


Stel de luchtdruk in:  
2.3-2.8kg/cm<sup>2</sup> 38-40 PSI



Gaat verder op de achterkant ...


## 2. Verwijderen van de boor

Zorg ervoor dat de boor volledig gestopt is met draaien. Druk dan stevig met de duim op de drukknop, en verwijder vervolgens de boor.

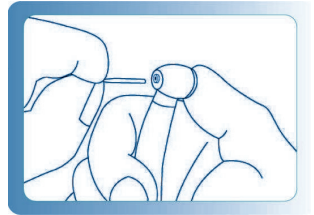

## Onderhoud


1. Verwijder eerst de boor, borstel vervolgens alle tanddebris van het hoekstuk.
2. Gebruik de reinigingsdraad om het watergat en het luchtgat schoon te maken. Vervolgens het hoekstuk uitwendig wassen / reinigen en desinfecteren (met een alcohol oplossing van max. 60% afnemen).
3. Hoekstuk inwendig wassen / reinigen en desinfecteren.
4. Hoekstuk op MULTIflex® hulpstuk van spraybus plaatsen en 1 seconde door sprayen. Bij sterke vervuiling deze stap herhalen. (Aanbevolen: KaVo® Spray 2112A)
5. Sluit het hoekstuk aan op de snelkoppeling. Zorg ervoor dat het water is uitgeschakeld.
6. Omvat de behuizing met gaas. Houd het uit de buurt van een draaiende boor om verstrengeling te vermijden.
7. Druk op het voetpedaal gedurende 20 seconden en controleer of er geen vuil op het gaas komt.
8. Herhaal deze stap totdat al het vuil het hoekstuk heeft verlaten en het gaas schoon blijft.
9. Na de behandeling, hoekstuk verpakt in sterilisatiezakje, tot max 138° C steriliseren in een druksterilisator. Na sterilisatie het hoekstuk onmiddellijk uit de sterilisator verwijderen. Door condens kan er schade aan het hoekstuk ontstaan.

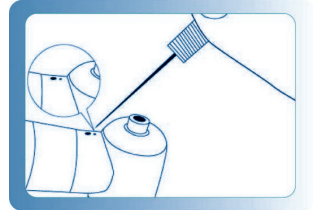

**Let op:** Dompel het hoekstuk nooit in een desinfecterende oplossing of water.

## Reiniging van de glasmaaf

1. Reinig de glazen staaf met reinigingsvloeistof en een zachte borstel.
2. Droog de glazen staaf voorzichtig met een wattenstaafje.
3. Vermijd krassen op de glazen staaf.

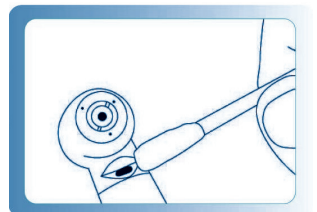

CODENT TECHNICAL INDUSTRY CO., LTD  
5F, No.90, Luke 5th Rd., Luzhu Dist.,  
Kaohsiung City, 821 Taiwan



Lotus Global Co., Ltd  
1 Four Seasons Terrace, West Drayton, Middlesex,  
London, UB7 9GG, United Kingdom