

Onderhoud

Tornado hoekstukken

Rood 1:5 met licht	ART 57 54 00
Blauw 1:1 zonder licht	ART 57 54 05
Blauw 1:1 met licht	ART 57 54 07

Belangrijke aanwijzingen

1. Houdt rekening met de veiligheid van de patiënt wanneer u dit hoekstuk gebruikt.
2. De drukknop indrukken terwijl het hoekstuk draait, veroorzaakt dat het hoekstuk overhit raakt. Wanneer u de drukknop indrukt, houdt het hoekstuk dan weg van het gezicht van de patiënt.
3. Hoekstuk niet uit elkaar halen of aanpassen.
4. Hoekstuk voorzichtig hanteren en niet laten vallen.
5. Hoekstukken mogen niet ultrasoon worden gereinigd.
6. Indien u een boor wilt verwijderen wacht dan totdat deze volledig is gestopt met draaien.
7. Gebruik geen boren langer dan 26 mm. Gebruik alleen tandheelkundige boren.
8. Indien er afwijkingen optreden, zoals trillingen, lawaai, of oververhitting, dan direct stoppen met het gebruik van het hoekstuk en onmiddellijk opsturen voor reparatie.
9. Neem contact op met ToDent voor professionele reparaties.

Plaatsen op micromotor

1. Zorg ervoor dat de opening van het hoekstuk evenwijdig loopt aan de micromotor.
2. Duw stevig het hoekstuk op de micromotor.
3. Zorg ervoor dat de connectie juist is.
4. Om te verwijderen trek stevig aan het hoekstuk en het zal vanzelf weer loskomen.

Het plaatsen van boren

1. Plaatsen van de boor

Druk op de drukknop met uw duim en steek de boor in het hoekstuk, dan laat u de drukknop weer los. **Opmerking:** de boor moet zo ver mogelijk worden ingebracht. U kunt de boor proberen te bewegen zonder de drukknop aan



te raken of de boor stevig vastzit.

2. Verwijderen van de boor

Zorg ervoor dat de boor volledig gestopt is met draaien. Druk dan stevig met de duim op de drukknop, en verwijder vervolgens de boor.

Extern schoonmaken

Opmerking: Verkeerd schoonmaken en onderhouden van het hoekstuk kan de levensduur van het hoekstuk zeer sterk verkorten.

1. Maak het hoekstuk grondig schoon met een borstel onder lopend water.
2. Het hoekstuk droogmaken met een droge doek of alcohol (met een alcohol oplossing van max. 60% afnemen).

Desinfecteren

Extern alleen desinfecteren door met pure isopropyl alcohol af te nemen. Hoekstuk inwendig wassen / reinigen en desinfecteren in de Thermodesinfector. Nooit chemische sterilisatie gebruiken zoals chlorine, adehyde of quaternaire aminen, residuen kunnen namelijk schadelijk zijn voor de patiënt. Desinfecteer uw hoekstuk nooit ultrasoon. Daarbij zal het handstuk beschadigen.

Smeren

1. Gebruik alleen premium hoekstuksmeermiddelen voor reiniging en onderhoud. (Aanbevolen: KaVo Spray 2112A)
2. Plaats het meegeleverde smeringshulpstuk op de spuitbus.
3. Plaats het hoekstuk op het hulpstuk en spuit dan 1-2 seconden. Bij sterke vervuiling deze stap herhalen.

Sterilisatie

Na de behandeling, hoekstuk verpakt in sterilisatiezakje, tot max 135° C steriliseren in een druksterilisator. Na sterilisatie het hoekstuk onmiddellijk uit de sterilisator verwijderen. Door condens kan er schade aan het hoekstuk ontstaan.


Let op: Dompel het hoekstuk nooit in een desinfecterende oplossing of water.

Reiniging van de glasstaaf (indien van toepassing)

1. Reinig de glazen staaf met reinigingsvloeistof en een zachte borstel.
2. Droog de glazen staaf voorzichtig met een wattenstaafje.
3. Vermijd krassen op de glazen staaf.



CODENT TECHNICAL INDUSTRY CO., LTD
5F, No.90, Luke 5th Rd., Luzhu Dist.,
Kaohsiung City, 821 Taiwan

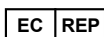

Lotus Global Co., Ltd
1 Four Seasons Terrace, West Drayton, Middlesex,
London, UB7 9GG, United Kingdom